


FEHLING GREPP MED SKRUVHYLSA

ABB-1, ABB-1F, ABB-2, ABB-3, ABB-5, ABB-6


1) Komponenter / grund för deklaration

- 1 Skruvhylsa, räfflad
- 2 Grepp, räfflat

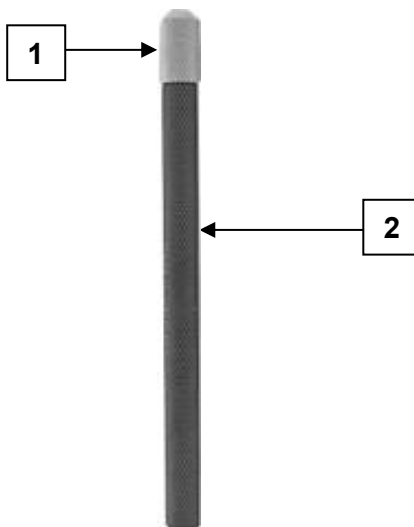

2) Demontering

1. Vrid skruvhylsan (1) på den främre delen av greppet (2) moturs tills den kan tas bort från gängan.

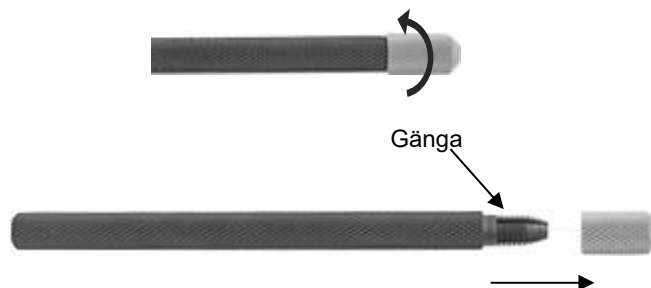


2. Instrumentet, som demonterats i sina enskilda delar, kan nu reprocessas.



För byte eller borttagning av skaftet från handtaget (2) behöver bara skruvhuvudet (1) lossas.

3) Montering

1. Sätt skruvhylsan (1) på gängan på den främre delen av greppet (2) och skruva åt medurs.

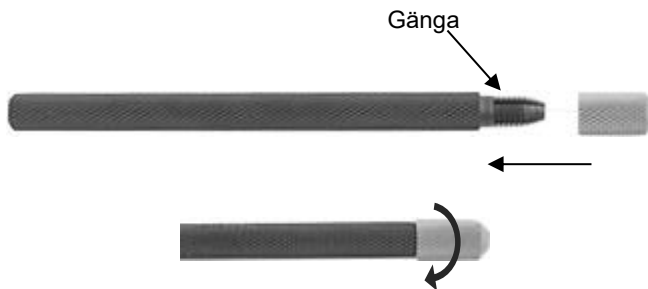

2. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.



För byte eller borttagning av skaftet från handtaget (2) behöver bara skruvhuvudet (1) lossas.

Symboler

Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:

 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	

Tillverkarens kontaktuppgifter

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---