


MANGO CON CASQUILLO ROSCADO FEHLING


ABB-1, ABB-1F, ABB-2, ABB-3, ABB-5, ABB-6

1) Componentes / Base explicativa

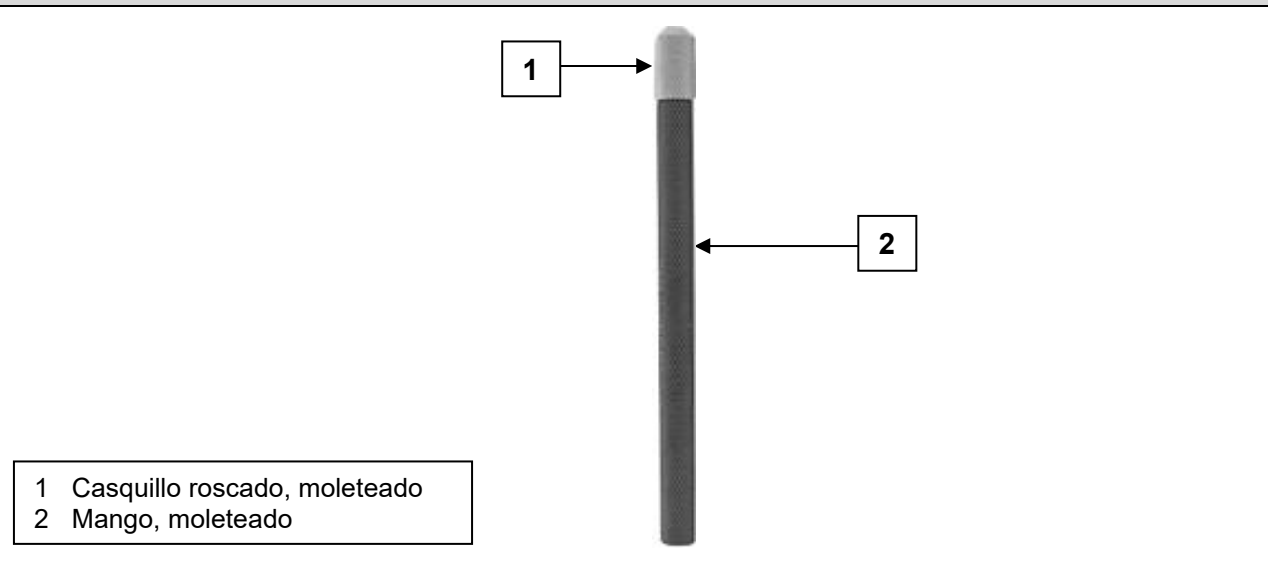

2) Desmontaje

1. Gire el casquillo roscado (1) de la parte delantera del mango (2) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que pueda soltarse de la rosca.

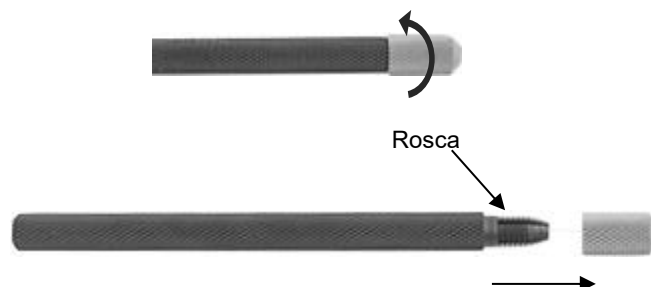


2. El instrumento, desmontado en sus piezas individuales, ya puede reprocesarse.



Sólo es necesario aflojar el casquillo roscado (1) para cambiar o extraer el eje del mango (2).

3) Montaje

1. Coloque el casquillo roscado (1) en la rosca de la parte delantera del mango (2) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

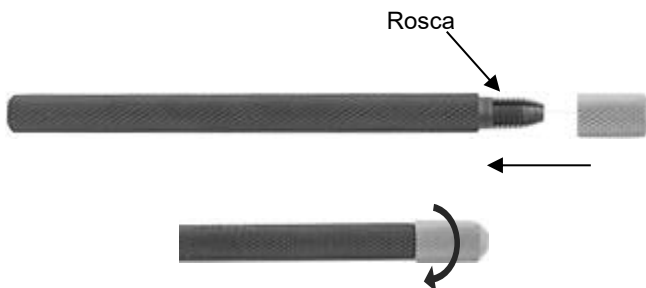

2. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.



Sólo es necesario aflojar el casquillo roscado (1) para cambiar o extraer el eje del mango (2).

Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
REF Número de catálogo	LOT Código de lote	SN Número de serie
MD Producto sanitario	UDI Identificador único del producto	 0297 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	
Contacto con el fabricante		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	