


Uchwyt z tuleją zaciskową FEHLING


ABB-1, ABB-1F, ABB-2, ABB-3, ABB-5, ABB-6

1) Elementy składowe / podstawa opisu

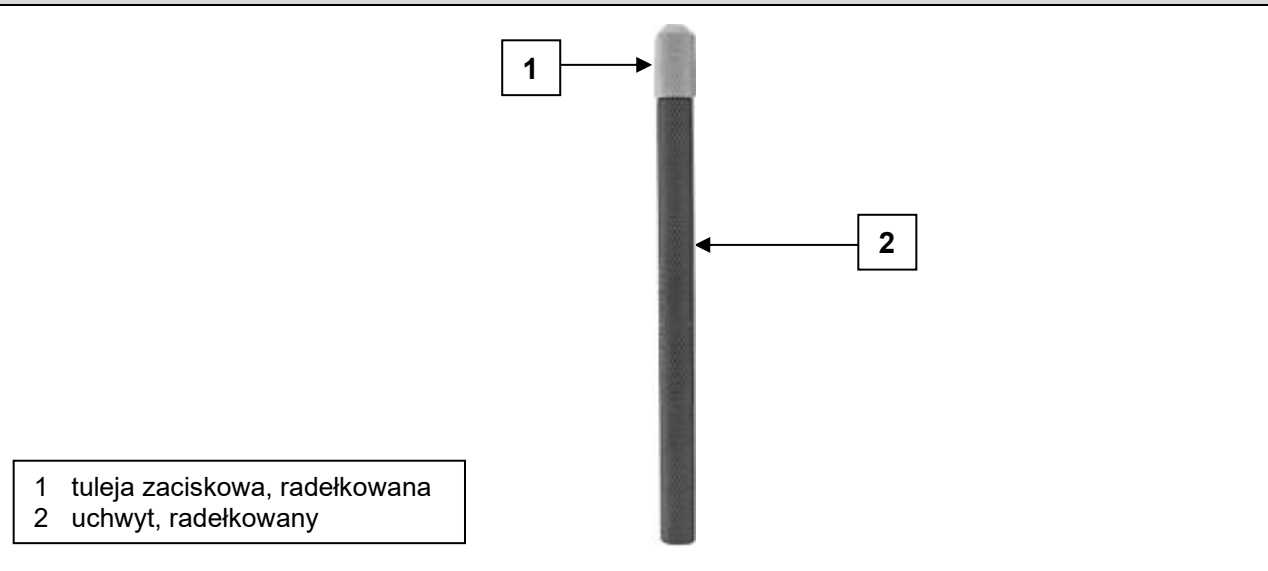

2) Demontaż

1. Obrócić tuleję zaciskową (1) z przodu uchwytu (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można ją zdjąć z gwintu.

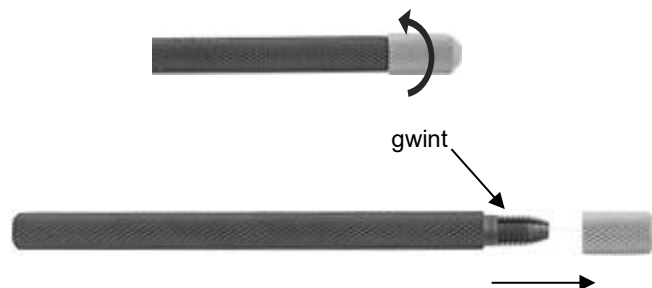


2. Narzędzie rozłożone na części można teraz poddać reprocessowaniu.



W celu wymiany lub wyjęcia trzonu z uchwytu (2) wystarczy lekko poluzować tuleję zaciskową (1).

3) Montaż

- Umieścić tuleję zaciskową (1) na gwincie z przodu uchwyty (2) i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

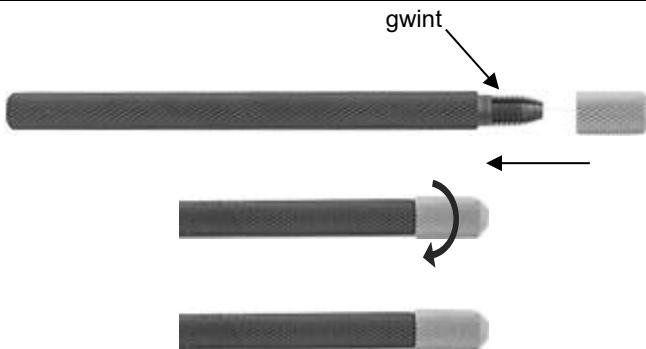

- Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.



W celu wymiany lub wyjęcia trzonu z uchwyty (2) wystarczy lekko poluzować tuleję zaciskową (1).

Symbole

Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji używania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:

 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
REF Numer katalogowy	LOT Kod partii	SN Numer seryjny
MD Wyrób medyczny	UDI Unikalny identyfikator wyrobu	 0297 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	