


FEHLING GUIDES DU CROCHET (POUR ADAPTATEUR À ROTULE) ET PINCES DE GUIDAGE

1a) Composants / base de la déclaration instruments en deux parties


À titre d'exemple : MRN-3A

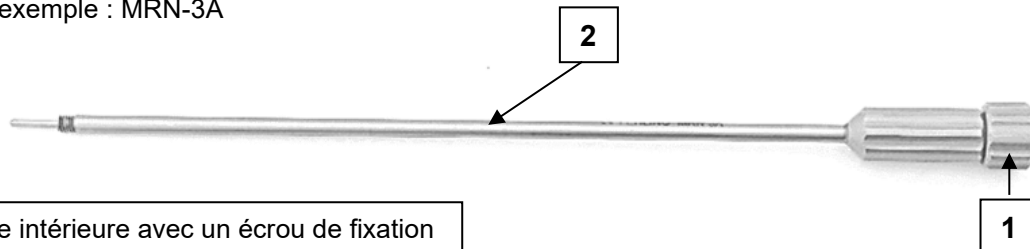

- 1 Tige intérieure avec un écrou de fixation
- 2 Douille extérieure

1b) Composants / base de la déclaration instruments en trois parties


À titre d'exemple : MRI-0

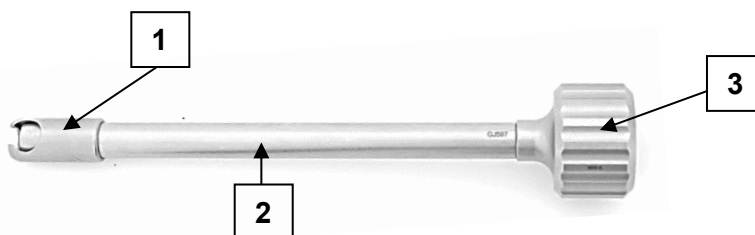


- 1 Tige intérieure
- 2 Douille extérieure
- 3 Écrou de fixation

2a) Démontage d'instruments en deux parties

1. Tourner l'écrou de fixation (3) sur la tige intérieure (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le filetage soit complètement desserré et que la tige intérieure (1) puisse être retirée de la douille extérieure (2) en direction de l'écrou de fixation (3).

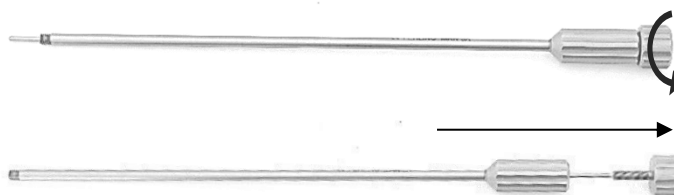

2. L'instrument démonté en pièces détachées peut maintenant être préparé.

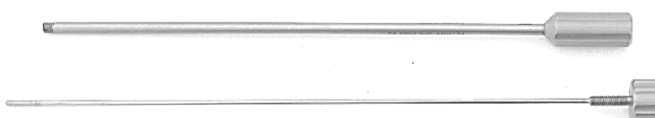

2b) Démontage des instruments en trois parties


1. Tourner l'écrou de fixation (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse être retiré du filetage de la tige intérieure (1).



2. Retirer la douille extérieure (2) de la tige intérieure (1) dans le sens du filetage.




3. L'instrument démonté en pièces détachées peut maintenant être préparé.

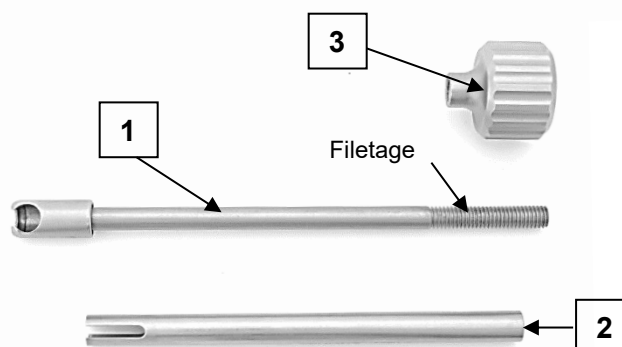

3a) Montage d'instruments en deux parties

1. Pousser la douille extérieure (2) sur la tige intérieure (1).

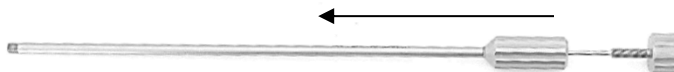

2. Placer l'écrou de fixation (3) sur le filetage de la tige intérieure (1) et le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.



3. L'instrument assemblé est désormais prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.



3b) Montage d'instruments en trois parties

1. Pousser la douille extérieure (2) sur le filetage sur la tige intérieure (1).



Veiller à ce que le verrou transversal, situé dans le logement pour les adaptateurs à rotule de la tige intérieure (1), glisse dans les deux fentes de la douille extérieure (2).

2. Placer l'écrou de fixation (3) sur le filetage de la tige intérieure (1) et le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.



3. L'instrument assemblé est maintenant prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.



Symboles

Lorsqu'ils sont représentés sur le dispositif médical, l'étiquette du dispositif médical ou dans la notice d'utilisation, les symboles ont la signification suivante, conformément à la norme DIN EN ISO 15223-1 :

 Fabricant	 Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique	 Attention
 Numéro du catalogue	 Code de lot	 Numéro de série
 Dispositif médical	 Identifiant unique de dispositif	 0297 Marquage CE
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE	

Contactez le fabricant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	---	---