


FEHLING HAKSTYRNINGAR (FÖR KULADAPTRAR) OCH STYRKLÄMMOR

1a) Komponenter / grund för deklaration tvådelade instrument


Exempel: MRN-3A

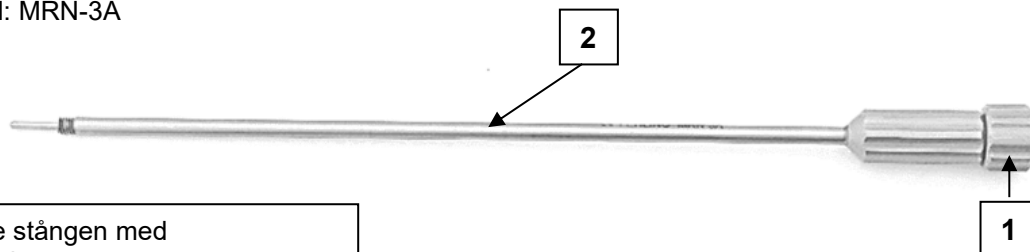

- 1 Inre stången med fixeringsmutter
- 2 Yttre hylsa

1b) Komponenter / grund för deklaration tredelade instrument


Exempel: MRI-0

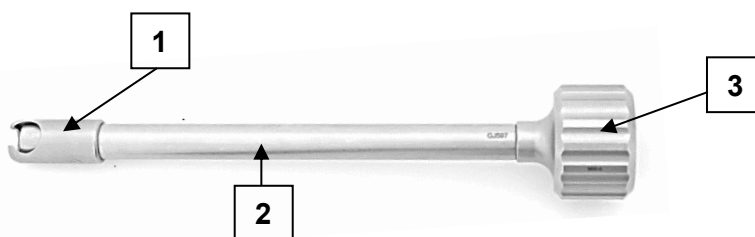


- 1 Inre stången
- 2 Yttre hylsa
- 3 Fixeringsmutter

2a) Demontering av tvådelade instrument

1. Vrid fästmuttern (3) på inre stången (1) moturs tills gängan är helt lossad och inre stången (1) kan dras ut ur yttre hylsan (2) i riktning mot fästmuttern (3).

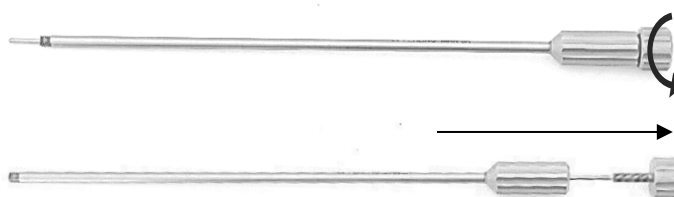

2. Instrumentet, som demonterats i sina enskilda delar, kan nu reprocessas.

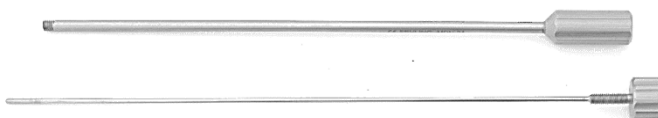


2b) Demontering av tredelade instrument


1. Vrid fästmuttern (3) moturs tills den kan tas bort från gängan på inre stången (1).



2. Dra av den yttre hylsan (2) från inre stången (1) i gängans riktning.

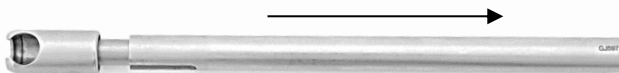

3. Instrumentet, som demonterats i sina enskilda delar, kan nu reprocessas.

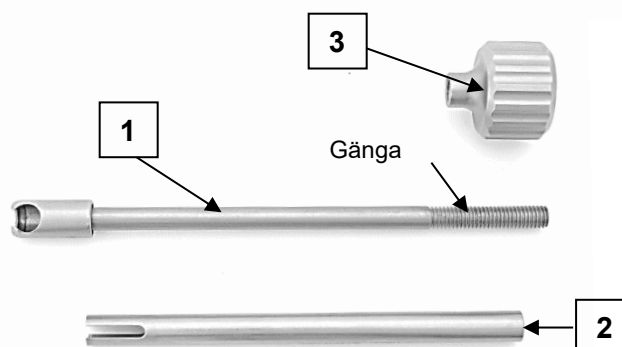

3a) Montering av tvådelade instrument

1. Skjut yttre hylsan (2) över inre stången (1).



2. Placera fästmuttern (3) på inre stången (1) gänga och skruva åt medurs.



3. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.



3b) Montering av tredelade instrument

1. Skjut yttre hylsan (2) över gängan på inre stången (1).



Se till att tvärstaven, som är placerad i kuladaptrarnas infästning på den inre stången (1), glider in i de två spåren på den yttre hylsan (2).

2. Placera fästmuttern (3) på inre stången (1) gänga och skruva åt medurs.



3. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.



Symboler

Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:

 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	

Tillverkarens kontaktuppgifter

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 CE 0297
---	---	--