


PROWADNICE HAKÓW (DO ADAPTERA KULOWEGO) I KLESZCZE USTALAJĄCE FEHLING

1a) Elementy składowe / podstawa opisu – narzędzia dwuczęściowe


Przykład: MRN-3A

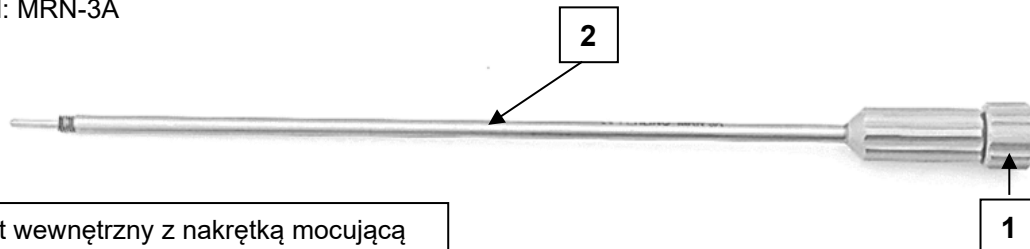

- 1 pręt wewnętrzny z nakrętką mocującą
- 2 tuleja zewnętrzna

1b) Elementy składowe / podstawa opisu – narzędzia trzyczęściowe


Przykład: MRI-0

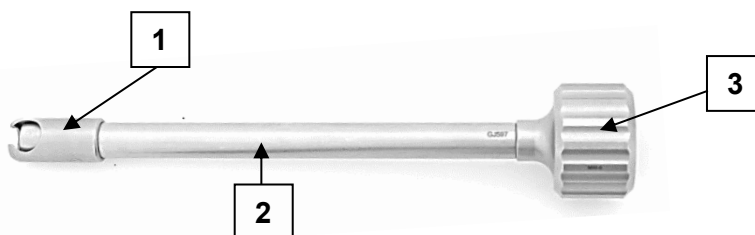

- 1 pręt wewnętrzny
- 2 tuleja zewnętrzna
- 3 nakrętka mocująca

2a) Demontaż narzędzi dwuczęściowych

1. Obrócić nakrętkę mocującą (3) na pręcie wewnętrznym (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można ją całkowicie zdjąć z gwintu, a następnie wyciągnąć pręt wewnętrzny (1) z tulei zewnętrznej (2) w kierunku nakrętki mocującej (3).
2. Narzędzie rozłożone na części można teraz poddać reprocessowaniu.

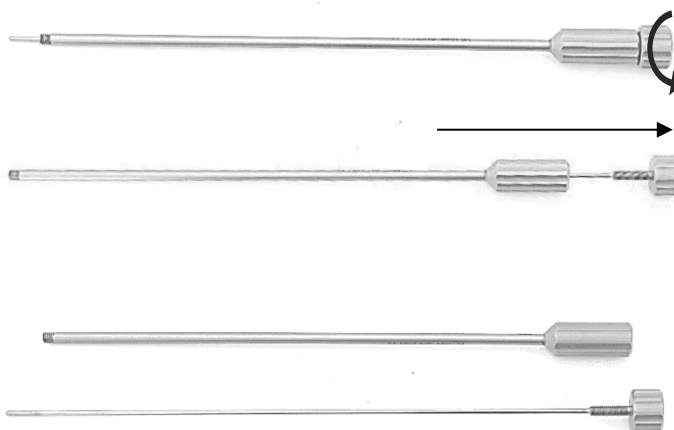


2b) Demontaż narzędzi trzyczęściowych


1. Obrócić nakrętkę mocującą (3) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można ją zdjąć z gwintu pręta wewnętrznego (1).



2. Ściągnąć tuleję zewnętrzną (2) z pręta wewnętrznego (1), pociągając w kierunku gwintu.

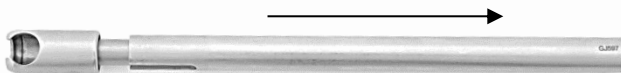

3. Narzędzie rozłożone na części można teraz poddać reprocessowaniu.

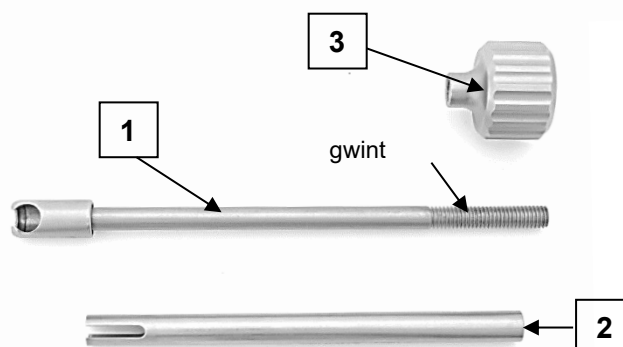

3a) Montaż narzędzi dwuczęściowych

1. Wsunąć tuleję zewnętrzną (2) na pręt wewnętrzny (1).



2. Założyć nakrętkę mocującą (3) na gwint pręta wewnętrznego (1) i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



3. Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.



3b) Montaż narzędzi trzyczęściowych

1. Wsunąć tuleję zewnętrzną (2) przez gwint na pręt wewnętrzny (1).



Poprzeczka w uchwycie adaptera kulowego pręta wewnętrznego (1) musi wsunąć się w oba rowki w tulei zewnętrznej (2).

2. Założyć nakrętkę mocującą (3) na gwint pręta wewnętrznego (1) i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



3. Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.



Symbole

Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:

 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 0297 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	

Dane kontaktowe producenta

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	---	---