

RETRAKTOR SOMOHA FEHLING

MTJ-1, MTJ-2, MTJ-3

1) Elementy składowe / podstawa opisu

Przykład: MTJ-3

Stan zmontowany



Stan zdemontowany




- 1 występy prowadzące
- 2 otwór wlotowy
- 3 prowadnica

2) Demontaż




Demontaż retraktora wymaga użycia odpowiedniej siły ze względu na właściwości materiału.

1. W celu demontażu retraktora należy chwycić go oburącz i przesunąć występy prowadzące (1) w kierunku otworu wlotowego (2).

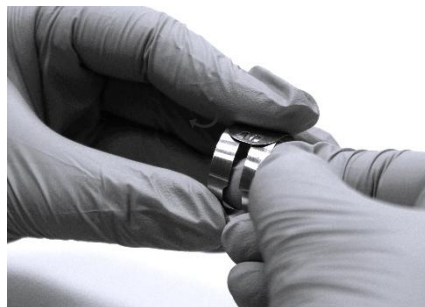

Nacisk należy wywierać równomiernie z obu stron, tak aby występy prowadzące (1) się nie przechylały.

2. Zwolnić występy prowadzące (1) z prowadnicy (3) przez otwór wlotowy (2). Następnie można rozłożyć retractor.

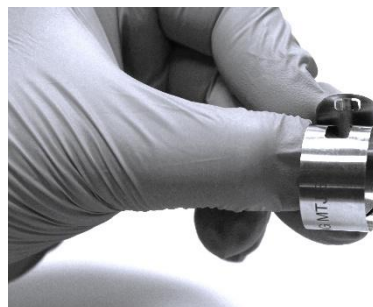


3) Montaż




Montaż retraktora wymaga użycia odpowiedniej siły ze względu na właściwości narzędzia.

1. W celu zmontowania należy umieścić oba końce retraktora jeden na drugim. Koniec z występami prowadzącymi (1) należy nasunąć na koniec z prowadnicą (3).

koniec z prowadnicą

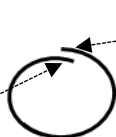

koniec z występami
prowadzącymi

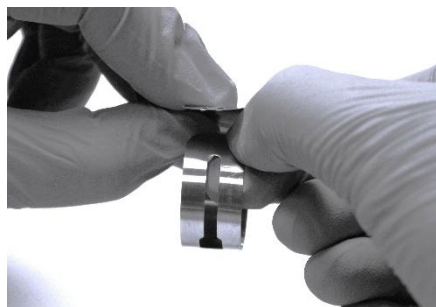

2. Umieścić występy prowadzące (1) nad otworem wlotowym (2) i wsunąć występy prowadzące (1) w otwór. Następnie lekko zwolnić nacisk i pozwolić, aby występy prowadzące (1) przesunęły się wzdłuż prowadnicy (3).



Jeśli nacisk nie będzie wystarczający, retractor może „odskoczyć” z powrotem do stanu zdemontowanego.

3. Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.



Po zakończeniu montażu należy upewnić się, że oba występy prowadzące (1) są zatrzaśnięte w otworze wlotowym (2).

Symbole		
Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		 0297
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	