


FEHLING BALKSPREIDER MET RONDSEL

Geldig voor alle balkspreiders met rondsel

1) Bestanddelen / verklarende basis




Als voorbeeld: MBT-4

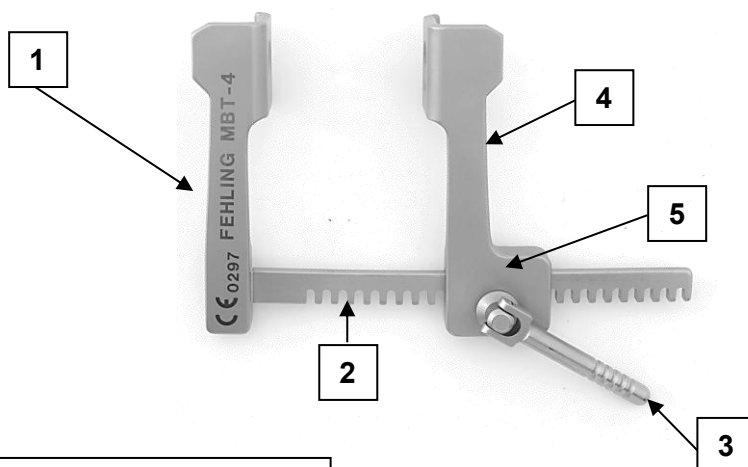

- 1 Vaste spreiderarm
- 2 Tandheugel
- 3 Aandrijfhendel
- 4 Beweegbare spreiderarm
- 5 Behuizing


2) Demontage

1. Draai de aandrijfhendel (3) linksom om de beweegbare spreiderarm (4) op de tandheugel (2) naar buiten te bewegen totdat deze kan worden verwijderd.
2. Verwijder in de tweede stap de aandrijfhendel (3).
3. Het in drie onderdelen uit elkaar gehaalde instrument kan nu worden verwerkt.

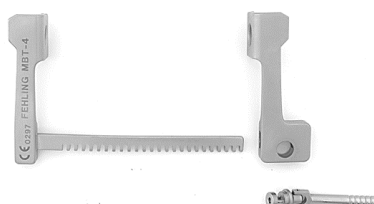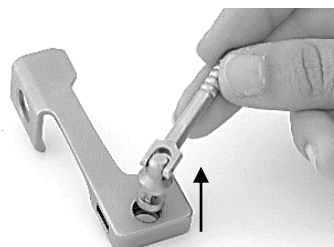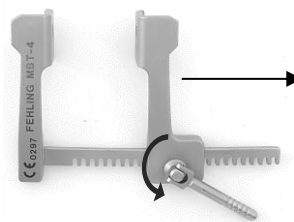


3) Montage

1. Steek eerst de aandrijfhendel (3) in de daarvoor bestemde uitsparing in de behuizing (5).

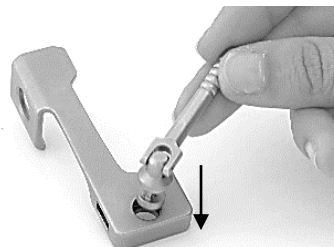


2. Steek de tandheugel (2) in de uitsparing in de behuizing (5) totdat het rondsel van de aandrijfhendel (3) in de tandheugel (2) grijpt.

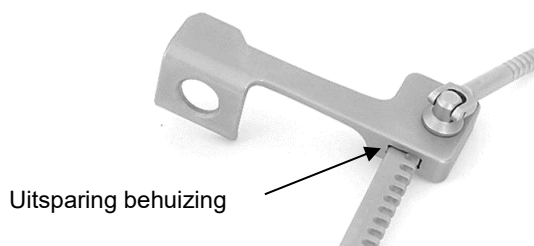


Zorg ervoor dat beide spreiderarmen in dezelfde richting wijzen.

3. Draai de aandrijfhendel (3) rechtsom om de beweegbare spreiderarm (4) op de tandheugel (2) naar binnen te bewegen in de richting van de draaibare spreiderarm (1).

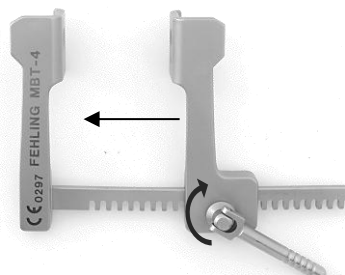

4. Na een functietest is het geassembleerde instrument nu weer klaar voor gebruik.

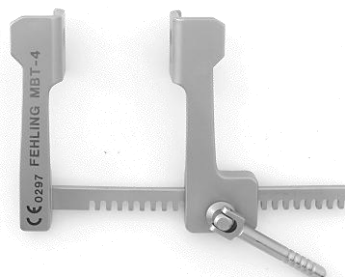

Symbolen

Waar weergegeven op het etiket van het medische hulpmiddel of de gebruiksaanwijzing, hebben de symbolen de volgende betekenis in overeenstemming met DIN EN ISO 15223-1:

 Fabrikant	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing	 Voorzichtig
 Catalogusnummer	 Batchcode	 Serienummer
 Medisch hulpmiddel	 Unieke identificatiecode	 CE-markering
 Oliekan voor te smeren punten	 CE-markering	

Neem contact op met de fabrikant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Selligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 CE-markering
---	--	---