


FEHLING RAMRETRAKTOR MED DREV

Gäller alla ramretraktorer med drev

1) Komponenter / grund för deklaration


Exempel: MBT-4

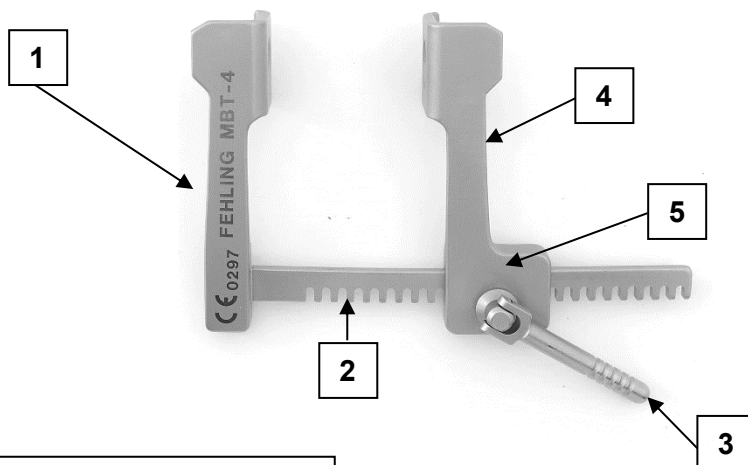


- 1 Fast retraktorarm
- 2 Kuggstången
- 3 Drivspak
- 4 Flyttbar retraktorarm
- 5 Box

2) Demontering


1. Vrid drivspaken (3) moturs för att flytta den rörliga retraktorarmen (4) längs kuggstången (2) utåt, tills den kan tas bort.

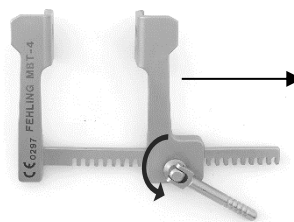

2. I det andra steget tar du bort drivspaken (3).

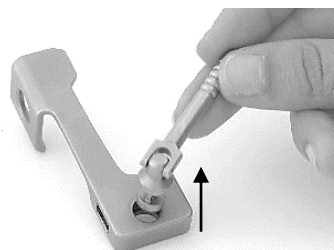


3. Instrumentet, som demonterats i sina tre enskilda delar, kan nu reprocessas.

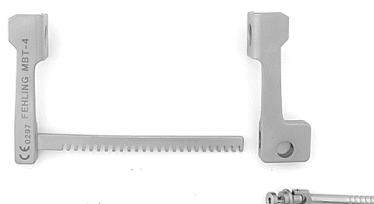


3) Montering

1. För först in drivspaken (3) i urtaget som finns i boxen (5).

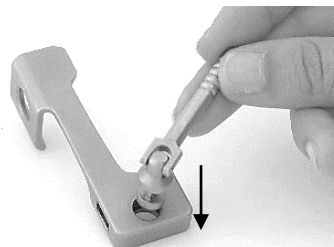


2. Skjut in kuggstången (2) i urtaget i boxen (5) tills drivspakens (3) kugghjul griper in i kuggstången (2).

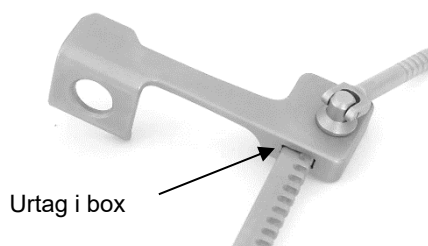


Se till att båda retraktorarmarna pekar åt samma håll.

3. Vrid drivspaken (3) medurs för att flytta den rörliga retraktorarmen (4) på kuggstången (2) inåt mot den fasta retraktorarmen (1).

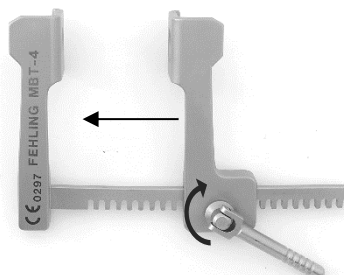

4. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.

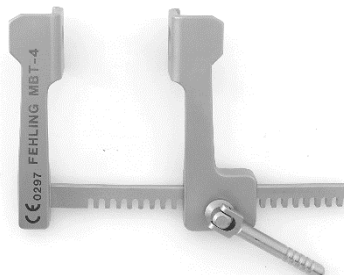

Symboler		
Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	
Tillverkarens kontaktuppgifter		 CE-märkning
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	