


ROZWIERACZ BELKOWY DO ŻEBER Z ZĘBĄTKĄ FEHLING

Dotyczy wszystkich rozwieraczy belkowych do żeber z zębątką

1) Elementy składowe / podstawa opisu


Przykład: MBT-4

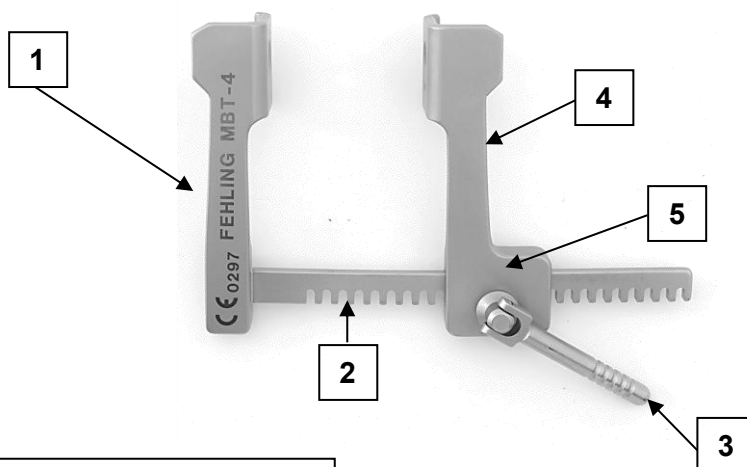


- 1 stałe ramię rozwierające
- 2 listwa zębata
- 3 dźwignia napędowa
- 4 ruchome ramię rozwierające
- 5 korpus

2) Demontaż


1. Obrócić dźwignię napędową (3) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć ruchome ramię rozwierające (4) na listwę zębataj (2), aż będzie można je wyjąć.

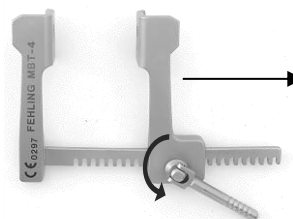

2. Zdemontować dźwignię napędową (3).

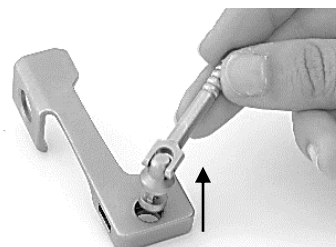


3. Narzędzie rozłożone na trzy części można teraz poddać reprociesowaniu.

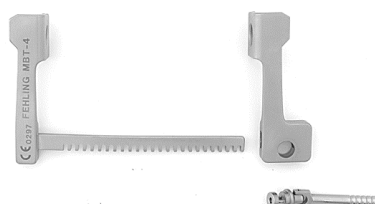


3) Montaż

1. Najpierw należy wsunąć dźwignię napędową (3) w wycięcie korpusu (5).

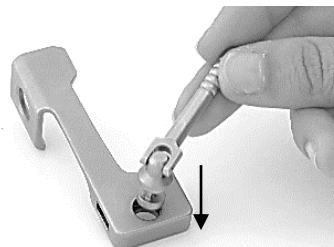


2. Włożyć listwę zębatą (2) do wycięcia w korpusie (5), aż zębata dźwigni napędowej (3) zaczepi się o listwę zębatą (2).

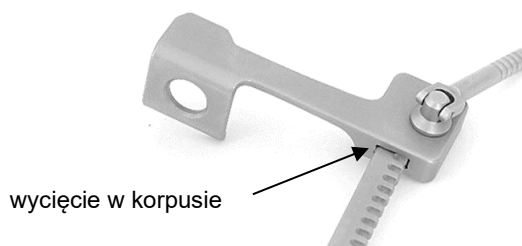


Oba ramiona rozwierające muszą być ułożone w tym samym kierunku.

3. Obrócić dźwignię napędową (3) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć ruchome ramię rozwierające (4) na listwie zębatej (2) do wewnątrz w kierunku stałego ramienia rozwierającego (1).

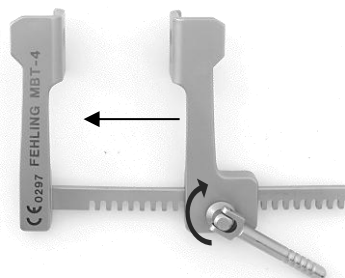

4. Zmontowane narzędzie jest teraz gotowe do ponownego użycia po wykonaniu testu działania.

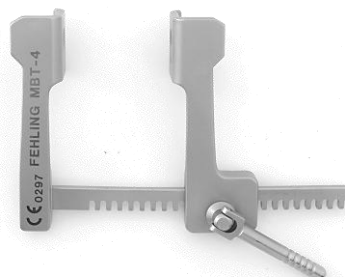

Symbole		
Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		 0297
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	