


FEHLING SEPARADOR DE TRONCOS CON PIÑÓN

Válido para todos los separadores de troncos con piñón

1) Componentes / Base explicativa


Ejemplar: MBT-4

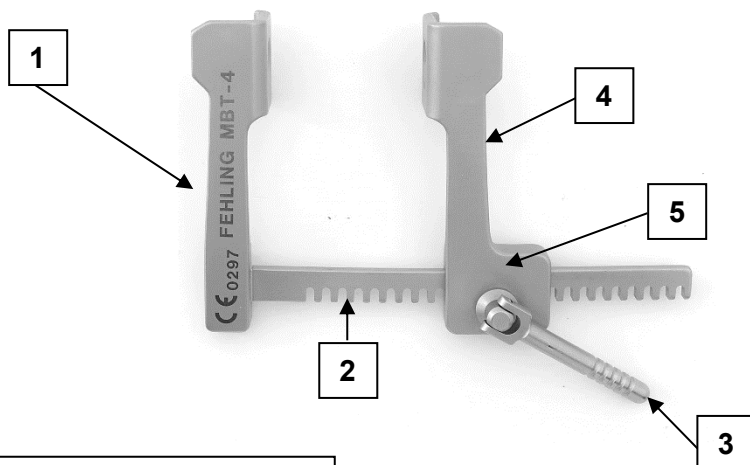


- 1 Brazo separador fijo
- 2 Cremallera dentada
- 3 Palanca de accionamiento
- 4 Brazo separador móvil
- 5 Caja

2) Desmontaje


1. Gire la palanca de accionamiento (3) en el sentido contrario a las agujas del reloj para desplazar el brazo separador móvil (4) hacia el exterior sobre la cremallera dentada (2) hasta que pueda extraerse.

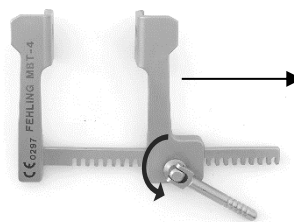

2. En el segundo paso, retire la palanca de accionamiento (3).

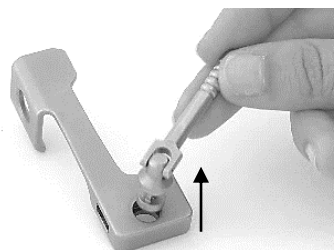


3. El instrumento, desmontado en sus tres partes individuales, ya puede reprocesarse.

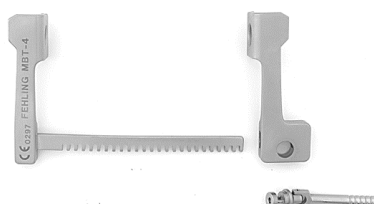


3) Montaje

1. Introduzca primero la palanca de accionamiento (3) en el hueco previsto en la caja (5).

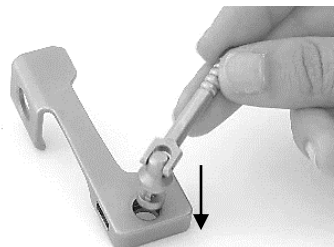


2. Introduzca la cremallera dentada (2) en el hueco de la caja (5) hasta que el piñón de la palanca de accionamiento (3) encaje en la cremallera dentada (2).

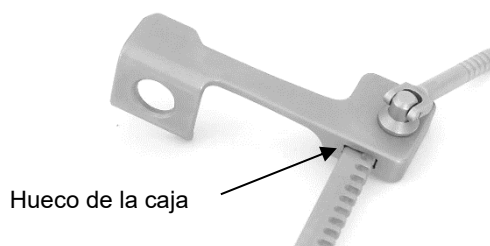


Asegúrese de que ambos brazos separadores apuntan en la misma dirección.

3. Gire la palanca de accionamiento (3) en el sentido de las agujas del reloj para desplazar el brazo separador móvil (4) sobre la cremallera dentada (2) hacia el interior, en dirección al brazo separador fijo (1).

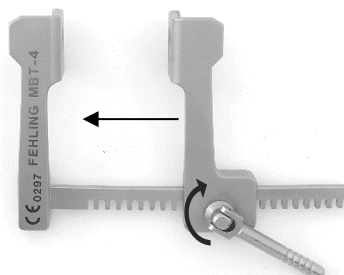

4. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.

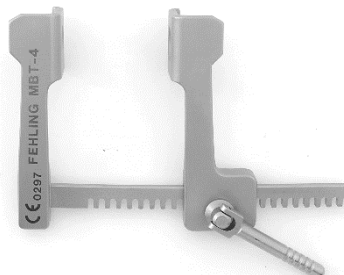

Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	

Contacto con el fabricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	--	---