


FEHLINGÉCARTEUR À BARRES AVEC UNE ROUE DENTÉE / UN BLOCAGE

Valable pour tous les écarteurs à barres avec une roue dentée (blocage)

1) Composants / base de la déclaration



À titre d'exemple : MRP-1

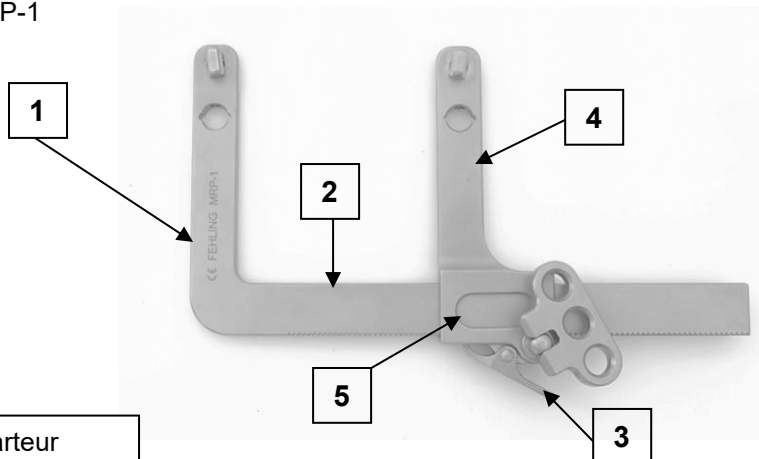

- 1 Bras fixe de l'écarteur
- 2 Crémaillère
- 3 Verrouillage
- 4 Bras mobile de l'écarteur
- 5 Boîte

2) Démontage


1. Transporter le bras mobile de l'écarteur (4) sur la crémaillère (2) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il puisse être retiré. Pendant ce temps, desserrer le dispositif de blocage (3) en exerçant une pression en direction de la crémaillère (2).
2. L'instrument démonté en pièces détachées peut maintenant être préparé.

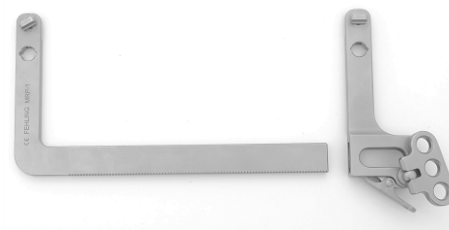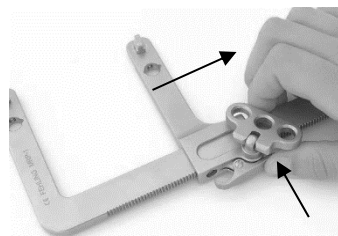

3) Montage


1. Introduire la crémaillère (2) dans l'évidement de la boîte (5). Pendant ce temps, desserrer le dispositif de blocage (3) en exerçant une pression en direction de la crémaillère (2).

Évidement de la boîte

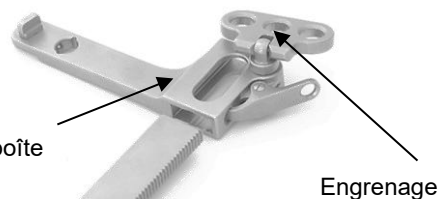


Veiller à ce que les deux bras de l'écarteur soient orientés dans la même direction et que la roue dentée du bras mobile de l'écarteur (4) soit orientée vers l'extérieur.

2. Transporter le bras mobile de l'écarteur (4) sur la crémaillère (2) vers l'intérieur en direction du bras fixe de l'écarteur (1).

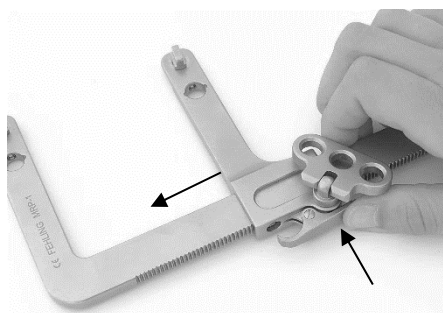

3. L'instrument assemblé est désormais prêt à l'emploi après un test de fonctionnement.

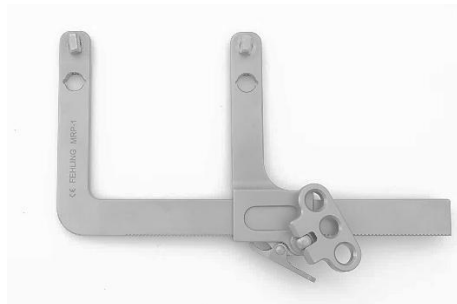

Symboles

Lorsqu'ils sont représentés sur le dispositif médical, l'étiquette du dispositif médical ou dans la notice d'utilisation, les symboles ont la signification suivante, conformément à la norme DIN EN ISO 15223-1 :

 Fabricant	 Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique	 Attention
 Numéro du catalogue	 Code de lot	 Numéro de série
 Dispositif médical	 Identifiant unique de dispositif	 0297 Marquage CE
 Burette d'huile pour les zones à lubrifier	 Marquage CE	

Contactez le fabricant

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tél. : +49 (0) 6188-9574-40 Fax : +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	---	--