


FEHLIN RAMRETRAKTOR MED KUGGHJUL / LÅS

Gäller alla ramretraktorer med kugghjul (lås)

1) Komponenter / grund för deklaration



Exempel: MRP-1

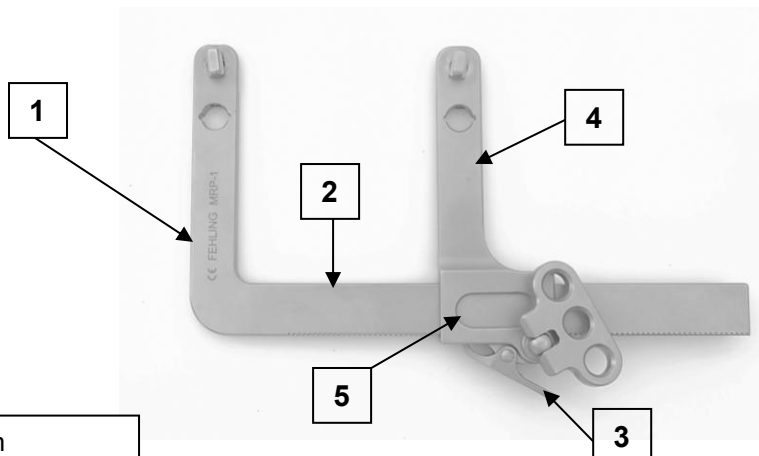

- 1 Fast retraktorarm
- 2 Kuggstav
- 3 Lås
- 4 Flyttbar retraktorarm
- 5 Box


2) Demontering

1. Flytta den rörliga retraktorarmen (4) utåt på kuggstaven (2) tills den kan avlägsnas. Lossa under tiden låset (3) genom att trycka i riktning mot kuggstaven (2).
2. Instrumentet, som demonterats i sina enskilda delar, kan nu reprocessas.

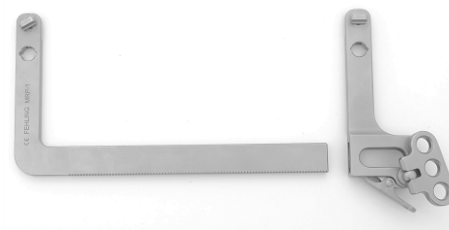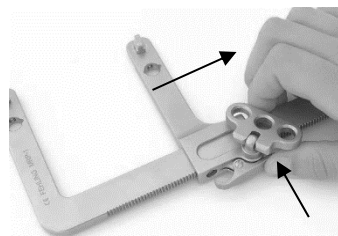


3) Montering

1. För in kuggstaven (2) i urtaget i boxen (5).
Lossa under tiden låset (3) genom att trycka i riktning mot kuggstaven (2).

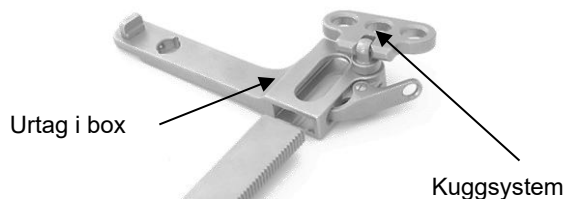


Se till att båda retraktorarmarna är riktade åt samma håll och att kuggsystemet på den rörliga retraktorarmen (4) pekar utåt.

2. Flytta den rörliga retraktorarmen (4) på kuggstaven (2) inåt mot den fasta retraktorarmen (1).

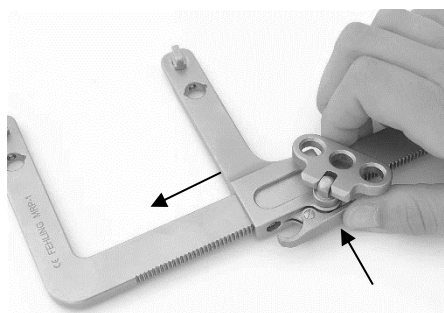

3. Det monterade instrumentet är nu redo att användas igen efter ett funktionstest.

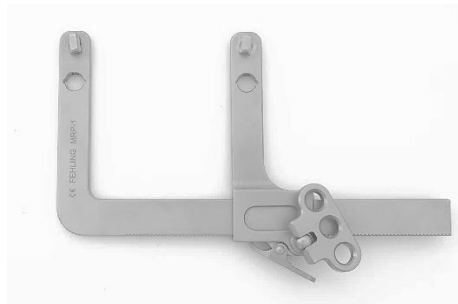

Symboler		
Där de visas på den medicintekniska produkten, etiketten eller bruksanvisningen, har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Viktigt
 Katalognummer	 Batchkod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik enhetsidentifierare	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	
Tillverkarens kontaktuppgifter		 0297
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein / Tyskland Tel: +49 (0)6188-957 440 Fax: +49 (0)6188-957 445 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	