


ROZWIERACZ BELKOWY DO ŻEBER Z KOŁEM ZĘBATYM / BLOKADĄ

Dotyczy wszystkich rozwieraczy belkowych do żebier z kołem zębatym (blokadą)

1) Elementy składowe / podstawa opisu



Przykład: MRP-1

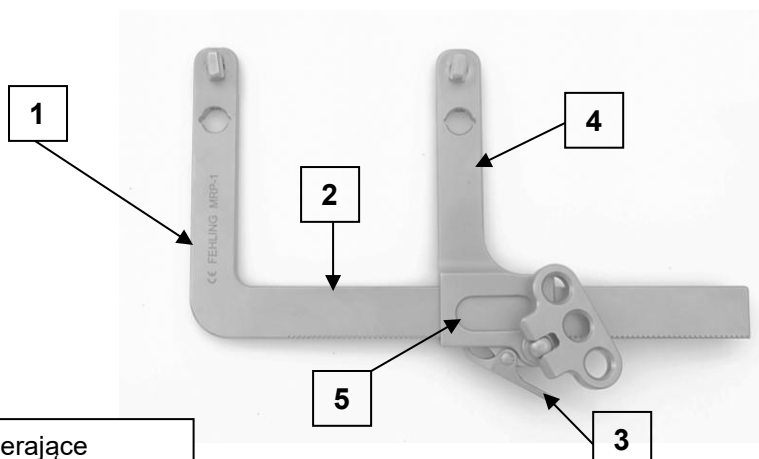

- 1 stałe ramię rozwierające
- 2 listwa zębata
- 3 blokada
- 4 ruchome ramię rozwierające
- 5 korpus


2) Demontaż

1. Ruchome ramię rozwierające (4) przesunąć na listwie zębatej (2) maksymalnie na zewnątrz, tak aby umożliwić jego wyjęcie. Jednocześnie zwolnić blokadę (3), naciskając w kierunku listwy zębatej (2).
2. Narzędzie rozłożone na części można teraz poddać reprocessowaniu.

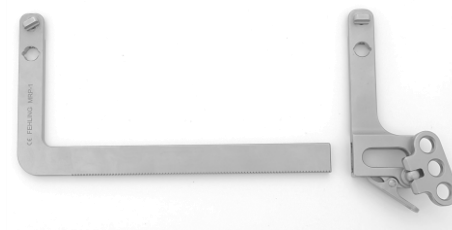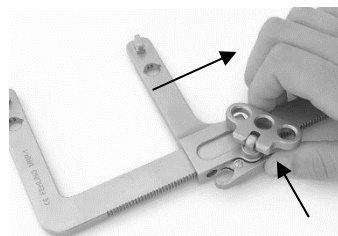


3) Montaż

1. Włożyć listwę zębatą (2) w wycięcie korpusu (5). Jednocześnie zwolnić blokadę (3), naciskając w kierunku listwy zębatej (2).

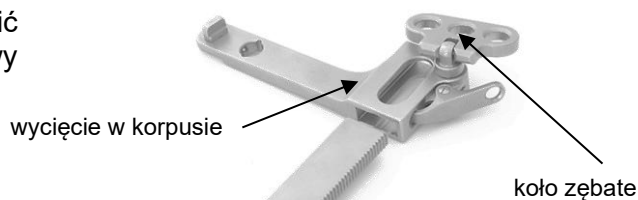


Oba ramiona rozwierające należy ustawić w tym samym kierunku, a koło zębate ruchomego ramienia rozwierającego (4) musi być skierowane na zewnątrz.

2. Przesunąć ruchome ramię rozwierające (4) na listwie zębatej (2) do wewnątrz w kierunku stałego ramienia rozwierającego (1).

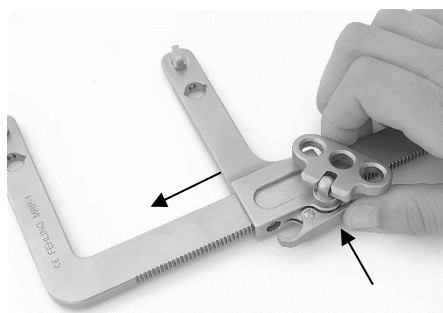

3. Po wykonaniu testu działania zmontowane narzędzie jest gotowe do ponownego użycia.

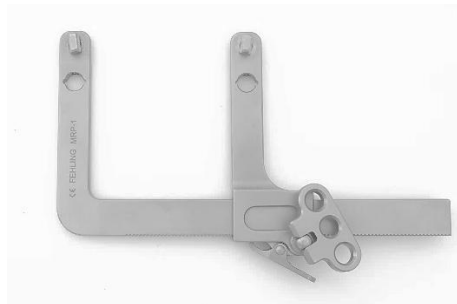

Symbole		
Symbole umieszczone na wyrobie medycznym, etykiecie wyrobu medycznego lub instrukcji użytkowania mają następujące znaczenie zgodnie z normą DIN EN ISO 15223-1:		
 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją użytkowania lub elektroniczną instrukcją użytkowania	 Uwaga
 Numer katalogowy	 Kod partii	 Numer seryjny
 Wyrób medyczny	 Unikalny identyfikator wyrobu	 0297 Oznakowanie CE
 Pojemnik na olej do miejsc przeznaczonych do smarowania	 Oznakowanie CE	
Dane kontaktowe producenta		 0297
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Niemcy Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Faks: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	