


SEPARADOR DE TRONCOS FEHLING CON RUEDA DENTADA / CIERRE

Válido para todos los separadores de troncos con rueda dentada (cierre)

1) Componentes / Base explicativa


Ejemplar: MRP-1

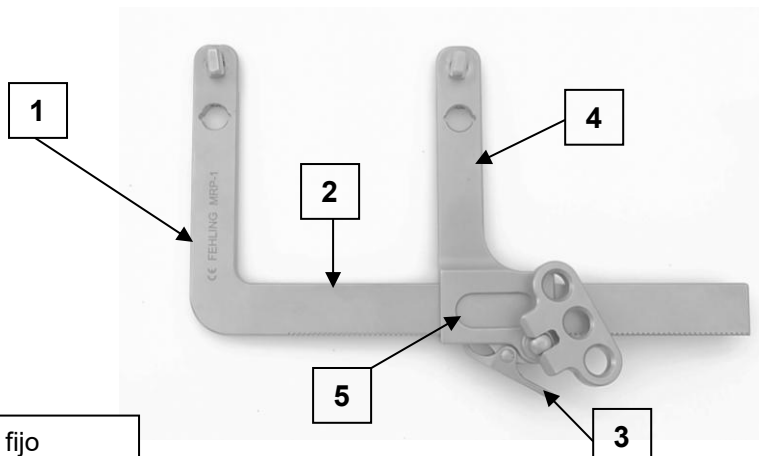


- 1 Brazo separador fijo
- 2 Cremallera dentada
- 3 Cierre
- 4 Brazo separador móvil
- 5 Caja

2) Desmontaje

1. Desplace el brazo separador móvil (4) hacia fuera sobre la cremallera dentada (2) hasta que pueda retirarse. Mientras tanto, suelte el cierre (3) presionando en la dirección de la cremallera dentada (2).

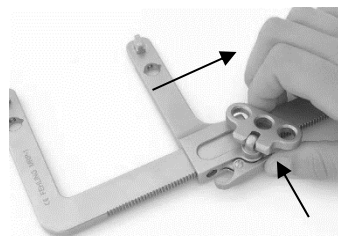


2. El instrumento, desmontado en sus piezas individuales, ya puede reprocesarse.

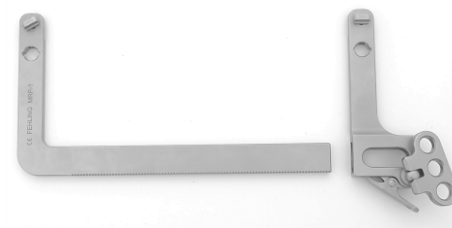


3) Montaje

1. Introduzca la cremallera dentada (2) en el hueco de la caja (5). Mientras tanto, suelte el cierre (3) presionando en la dirección de la cremallera dentada (2).

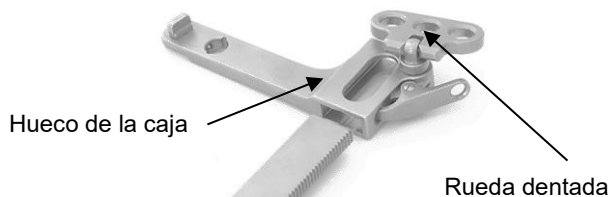


Asegúrese de que ambos brazos separadores apunten en la misma dirección y que la rueda dentada del brazo separador móvil (4) apunte hacia fuera.

2. Desplace el brazo separador móvil (4) sobre la cremallera dentada (2) hacia el interior, en dirección al brazo separador fijo (1).

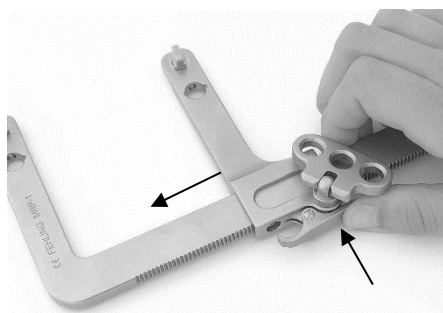

3. El instrumento montado ya está listo para volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.

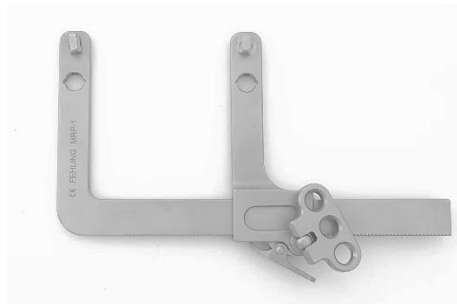

Símbolos

Cuando aparezcan los símbolos en el producto sanitario o en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, éstos tienen el siguiente significado de conformidad con la norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónico	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	

Contacto con el fabricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	 0297
---	--	---