


Grampo de fixação para mesa cirúrgica FEHLING

EEJ-1, EEK-1F, EEK-1S

1) Componentes \ Base explicativa

Exemplo: EEJ-1

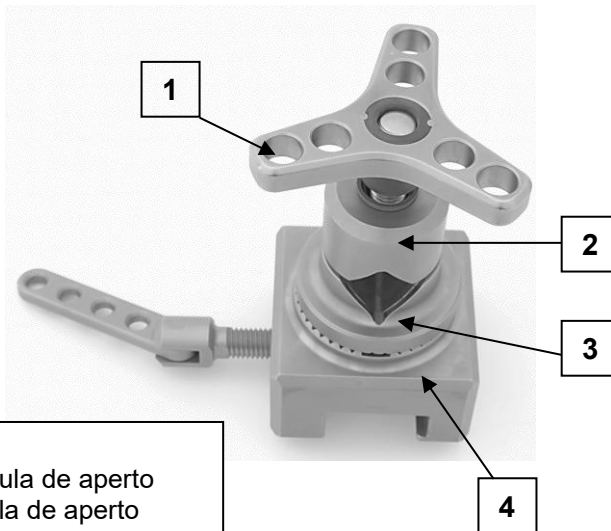


- 1 Pega em estrela
- 2 Parte superior da mandíbula de aperto
- 3 Parte inferior da mandíbula de aperto
- 4 Base

2) Desmontagem

1. Rodar a pega em estrela (1) no sentido contrário aos ponteiros do relógio até poder removê-la.




2. Puxar primeiro a parte superior da mandíbula de aperto (2) pelo roscado da base (4) e, em seguida, remover a parte inferior da mandíbula de aperto (3).

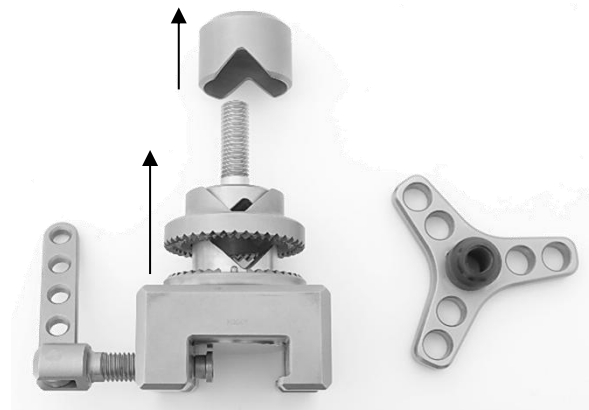

3. O instrumento desmontado nas suas partes individuais pode ser agora reprocessado.

3) Montagem

1. Colocar a parte inferior da mandíbula de aperto (3) na base (4) e, em seguida, introduzir a parte superior da mandíbula de aperto (2) pelo roscado da base (4).

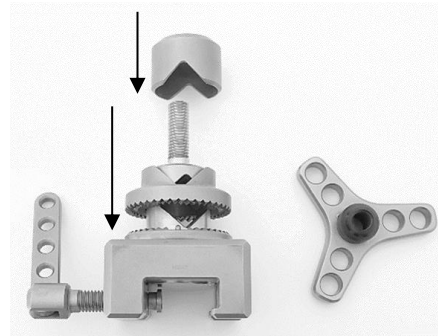












2. Colocar a pega em estrela (1) no roscado da base (4) e apertá-la no sentido dos ponteiros do relógio.




3. O instrumento montado está agora pronto a ser utilizado após um teste funcional.

Símbolos

Na medida em que figurem no dispositivo médico, na etiqueta do dispositivo médico ou nas instruções de utilização, os símbolos têm o seguinte significado, de acordo com a norma DIN EN ISO 15223-1:

 Fabricante	 Consultar instruções de utilização ou consultar as instruções de utilização eletrónicas	 Advertência
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de série
 Dispositivo médico	 Identificação única do dispositivo	 0297 Marcação de Conformidade CE
 Lata de óleo para locais a lubrificar	 Marcação de Conformidade CE	

Contacto do fabricante	
	<p>FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemanha Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de</p>
