


**GUIAS DE GANCHO (PARA ADAPTADORES ESFÉRICOS) E ALICATES GUIA FEHLING**

**1a) Componentes/Base explicativa de instrumentos de duas peças**


Exemplo: MRN-3A

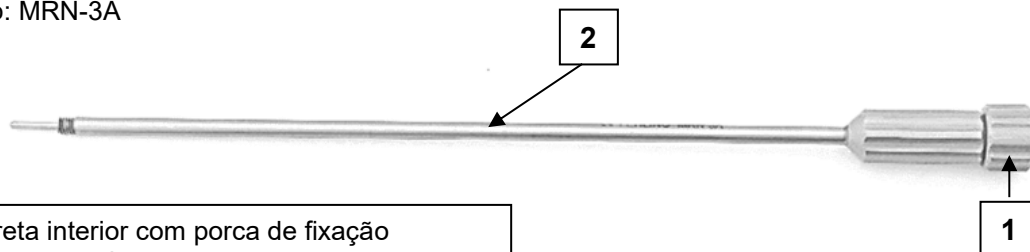

- 1 Vareta interior com porca de fixação
- 2 manga exterior

**1b) Componentes / Base explicativa de instrumentos de três peças**

Exemplo: MRI-0

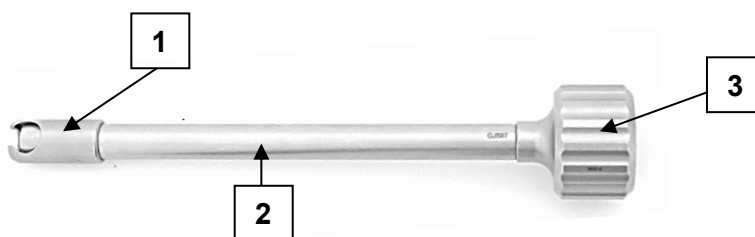


- 1 Vareta interior
- 2 manga exterior
- 3 Porca de fixação

## 2a) Desmontagem de instrumentos de duas peças

1. Rodar a porca de fixação (3) na vareta interior (1) no sentido contrário aos ponteiros do relógio até que o parafuso esteja completamente solto e a vareta interior (1) possa ser puxada para fora da manga exterior (2) na direção da porca de fixação (3).



2. O instrumento desmontado nas suas partes individuais pode ser agora reprocessado.

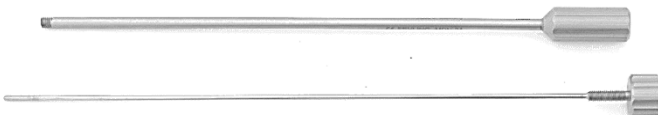

## 2b) Desmontagem de instrumentos de três peças


1. Rodar a porca de fixação (3) no sentido contrário aos ponteiros do relógio até que possa ser retirada do parafuso da vareta interior (1).



2. Puxar a manga exterior (2) para fora da vareta interior (1) na direção do parafuso.



3. O instrumento desmontado nas suas partes individuais pode ser agora reprocessado.

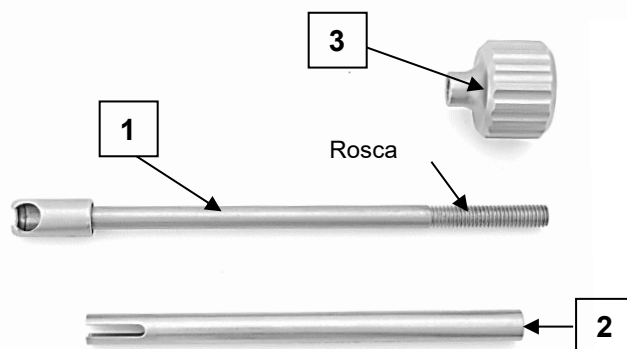

**3a) Montagem de instrumentos de duas peças**

1. Deslizar a manga exterior (2) sobre a vareta interior (1).



2. Colocar a porca de fixação (3) no parafuso da vareta interior (1) e apertar no sentido dos ponteiros do relógio.



3. O instrumento montado está agora pronto a ser utilizado após um teste funcional.



**3b) Montagem de instrumentos de três peças**

1. Deslizar a manga exterior (2) sobre o parafuso da vareta interior (1).
















Certificar-se de que a barra transversal, que se encontra no encaixe para os adaptadores esféricos da vareta interior (1), desliza para dentro das duas ranhuras da manga exterior (2).

2. Colocar a porca de fixação (3) no parafuso da vareta interior (1) e apertar no sentido dos ponteiros do relógio.



3. O instrumento montado está agora pronto a utilizar após um teste funcional.



Símbolos		
<p>Na medida em que figurem no dispositivo médico, na etiqueta do dispositivo médico ou nas instruções de utilização, os símbolos têm o seguinte significado, de acordo com a norma DIN EN ISO 15223-1:</p>		
 Fabricante	 Consultar instruções de utilização ou consultar as instruções de utilização eletrónicas	 Advertência
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de série
 Dispositivo médico	 Identificação única do dispositivo	 0297 Marcação de Conformidade CE
 Lata de óleo para locais a lubrificar	 Marcação de Conformidade CE	
Contacto do fabricante		 0297
	<p>FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemanha Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: <a href="mailto:info@fehling-instruments.de">info@fehling-instruments.de</a> <a href="http://www.fehling-instruments.de">www.fehling-instruments.de</a></p>	