

PUNZONI FEHLING APART

1) Componenti / Principio di funzionamento



2) Smontaggio

1. Afferrare il punzone con entrambe le mani come mostrato nella figura.
2. Con il pollice della mano destra premere il pulsante (2) e contemporaneamente appoggiare l'indice della mano destra sul cursore (4) (per evitare che il cursore (4) si sfili accidentalmente).




- Quando il pulsante (2) non può più essere premuto ulteriormente, mantenerlo in questa posizione e contemporaneamente tirare verso il basso e diagonalmente la parte mobile dell'impugnatura (3) con la mano sinistra.



La parte mobile dell'impugnatura (3) non può essere estratta completamente, poiché è collegata al corpo del punzone (1) tramite il pulsante (2).

- Il cursore (4) si sgancia ora dalla propria sede e può quindi essere rimosso facilmente.
- Sottoporre sempre entrambi i componenti singoli a ricondizionamento nello stesso contenitore.

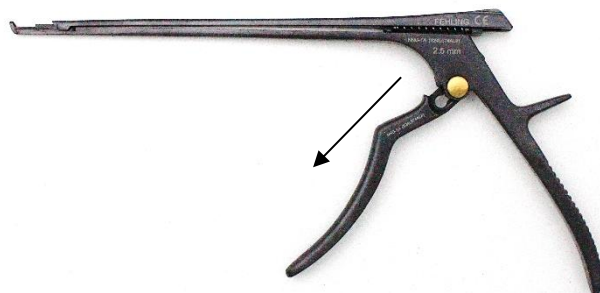

Il corpo del punzone (1), la parte mobile dell'impugnatura (3) e il cursore (4) sono contrassegnati dallo stesso numero di serie a scopo di controllo (5), ad esempio X19E214WM. È consentito assemblare esclusivamente componenti dello strumento aventi lo stesso numero di serie (5).


3) Montaggio

- Posizionare il cursore (4) con la molla (7) sullo stelo (1). Inserire i bordi di guida/perni di guida (6) del cursore (4) nei corrispondenti alloggiamenti presenti nello stelo (1).



I bordi di guida/i perni di guida (6) del cursore (4) devono inserirsi nei corrispondenti alloggiamenti presenti nello stelo del corpo del punzone (1).

2. Spingere lentamente il cursore (4) verso il piede del punzone fino a far sporgere l'estremità del cursore (4) di circa 5 mm oltre l'estremità dello stelo, dal lato del piede del punzone.

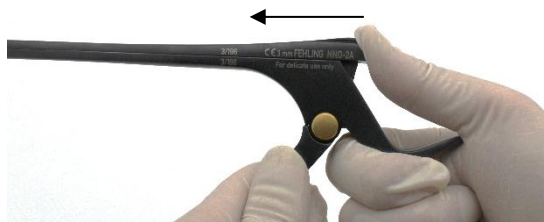

3. Senza modificare la posizione del cursore (4) e dello stelo (1), inserire la parte mobile dell'impugnatura (3) nel corpo del punzone (1) fino a percepire lo scatto di innesto.



4. La parte mobile dell'impugnatura (3) è correttamente innestata solo se il pulsante (2) sporge completamente, come mostrato in figura. Se il pulsante si trova nella posizione rappresentata nella figura "ERRATO", è necessario ripetere la procedura di montaggio. A tal fine, smontare innanzitutto lo strumento come descritto nella sezione 2) *Smontaggio*, quindi rimontarlo secondo le indicazioni della sezione 3) *Montaggio* e verificare nuovamente la posizione del pulsante.



CORRETTO

ERRATO

	Il punzone può essere utilizzato solo se la parte mobile dell'impugnatura (3) è innestata e bloccata correttamente!
	Durante l'uso, non premere mai il pulsante di bloccaggio dorato. In caso contrario, il punzone potrebbe smontarsi completamente o parzialmente.
	Soprattutto quando si esercita molta forza, prestare attenzione a non premere il pollice o un'altra parte della mano sul pulsante di bloccaggio. La pressione sul pulsante potrebbe attivare il meccanismo di sblocco.
	Se il punzone si inceppa o non scorre stabilmente nella guida, verificare immediatamente che sia stato montato correttamente. Il corretto montaggio del punzone è riconoscibile dal fatto che il pulsante di bloccaggio dorato, sul lato contrassegnato del punzone, sporge completamente.
	In caso contrario, prima di continuare a utilizzare il punzone, consegnarlo al personale di sala operatoria affinché provveda a montarlo correttamente.

5. Dopo aver eseguito una prova di funzionamento, il punzone può essere nuovamente utilizzato



Simboli

Se raffigurati sul dispositivo medico e/o sulla relativa etichetta e/o nelle istruzioni per l'uso, questi simboli secondo DIN EN ISO 15223-1 hanno il seguente significato:

 Fabbricante	 Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni per l'uso elettroniche	 Attenzione
 Numero di catalogo	 Codice del lotto	 Numero di serie
 Dispositivo medico	 Identificatore univoco del dispositivo	 Marcatura CE
 Lattina d'olio per le aree da lubrificare	 Marcatura CE	

Informazioni di contatto del fabbricante

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	--	---