


FEHLING APART-STANSAR

1) Komponenter / förklaringsgrund

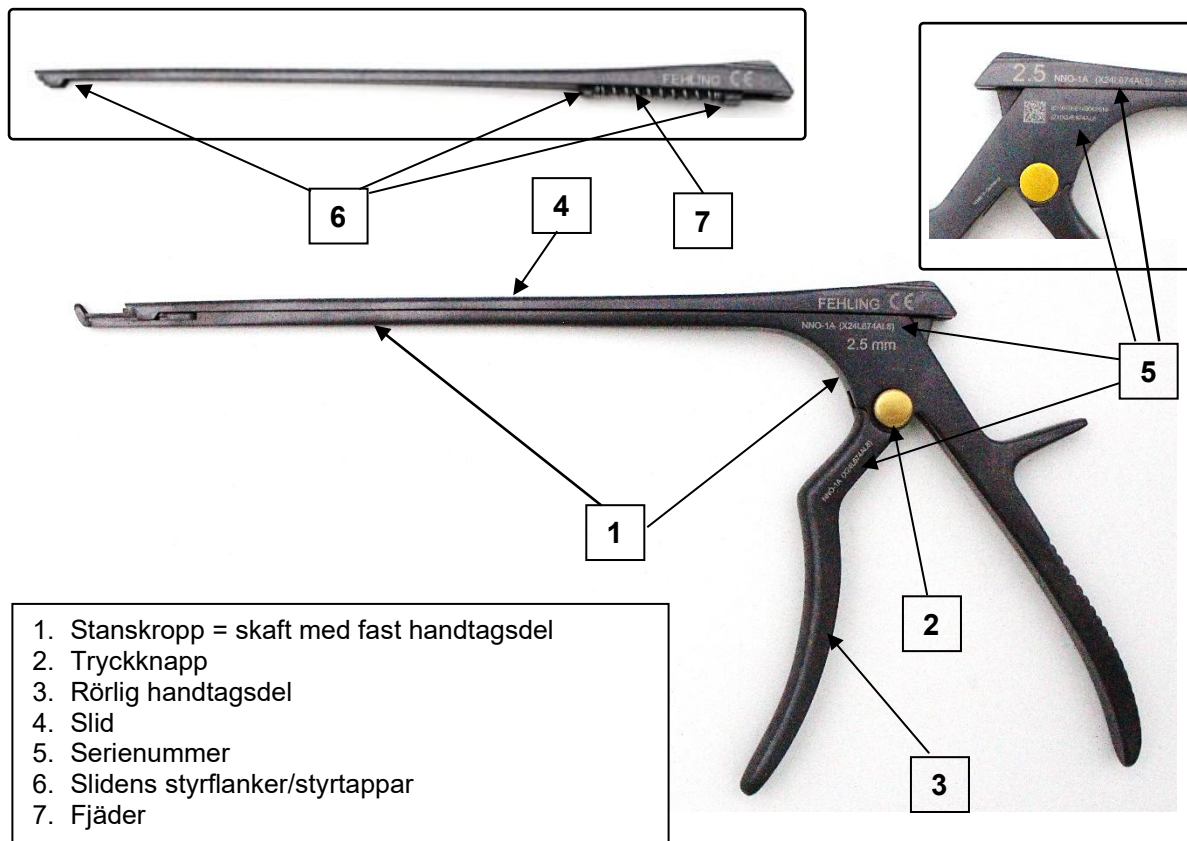

2) Demontering

1. Ta stansen i båda händerna enligt bilden.




2. Tryck på tryckknappen (2) med höger tumme och placera samtidigt höger pekfinger på sliden (4) (så att sliden (4) inte kan falla ut okontrollerat).



3. När tryckknappen (2) inte går att trycka in längre, håll kvar positionen och dra samtidigt den rörliga handtagsdelen (3) snett nedåt med vänster hand.



Den rörliga handtagsdelen (3) kan inte dras ut helt, eftersom den är ansluten till stansroppen (1) via tryckknappen (2).

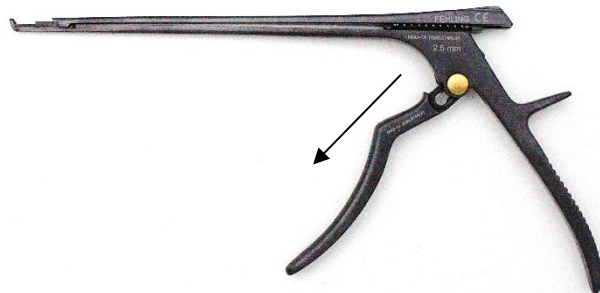

4. Sliden (4) fjädrar nu ut ur sitt fäste och kan enkelt tas bort



5. Reprocessa alltid de två enskilda delarna tillsammans i samma behållare.



Stansroppen (1), den rörliga handtagsdelen (3) samt sliden (4) har ett identiskt serienummer för kontroll (5), till exempel X19E214WM. Endast instrumentdelar med samma serienummer (5) får monteras ihop.

3) Montering

1. Placera sliden (4) med fjädern (7) på skaftet (1). För samtidigt in slidens (4) styrflanker/styrtappar (6) i motsvarande fästen i stansroppens skaft (1).



Slidens (4) styrflanker/styrtappar (6) måste passa in i motsvarande fästen i stansroppens skaft (1).

2. Tryck långsamt sliden (4) i riktning mot stansfoten, tills slidens ände (4) har skjutits ca 5 mm över skaftets ände i riktning mot stansfoten.



3. Skjut in den rörliga handtagsdelen (3) i stansroppen (1) utan att ändra slidens (4) och skaftets (1) position tills den hörbart snäpper fast.



4. Den rörliga handtagsdelen (3) är endast korrekt fastsatt om tryckknappen (2) sticker ut helt som visas. Om tryckknappens position ser ut som på bilden "FEL" måste monteringen göras om. Demontera först instrumentet enligt avsnitt 2) *Demontering*, montera det sedan igen enligt avsnitt 3) *Montering* och kontrollera återigen tryckknappens position.



RÄTT

FEL

	Stansen får endast användas om den rörliga handtagsdelen (3) är korrekt låst!
	Tryck aldrig ner den gyllene låsknappen under användning. Stansen kan då helt eller delvis demonteras.
	Se till att inte tummen eller någon annan del av handen trycker på låsknappen, särskilt när du använder mycket kraft. Trycket kan utlösa upplåsningsmekanismen.
	Om stansen fastnar eller inte löper stabilt i styrningen, kontrollera omedelbart om den är korrekt monterad. En korrekt monterad stans känns igen på att den gyllene låsknappen sticker ut helt på stansens märkta sida.
	Om så inte är fallet ska stansen överlämnas till operationspersonalen för korrekt montering innan den används igen

5. Efter ett funktionstest kan stansen användas igen



Symboler		
I den mån de visas på den medicintekniska produkten, etiketten för den medicintekniska produkten eller i bruksanvisningen har symbolerna följande betydelse enligt DIN EN ISO 15223-1:		
 Tillverkare	 Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen	 Varning
 Katalognummer	 Satskod	 Serienummer
 Medicinteknisk produkt	 Unik produktidentifiering	 CE-märkning
 Oljekanna för smörjställen	 CE-märkning	
Kontakta tillverkaren		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-post: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	