


Punzón FEHLING CONCEPT X

1) Componentes / base explicativa

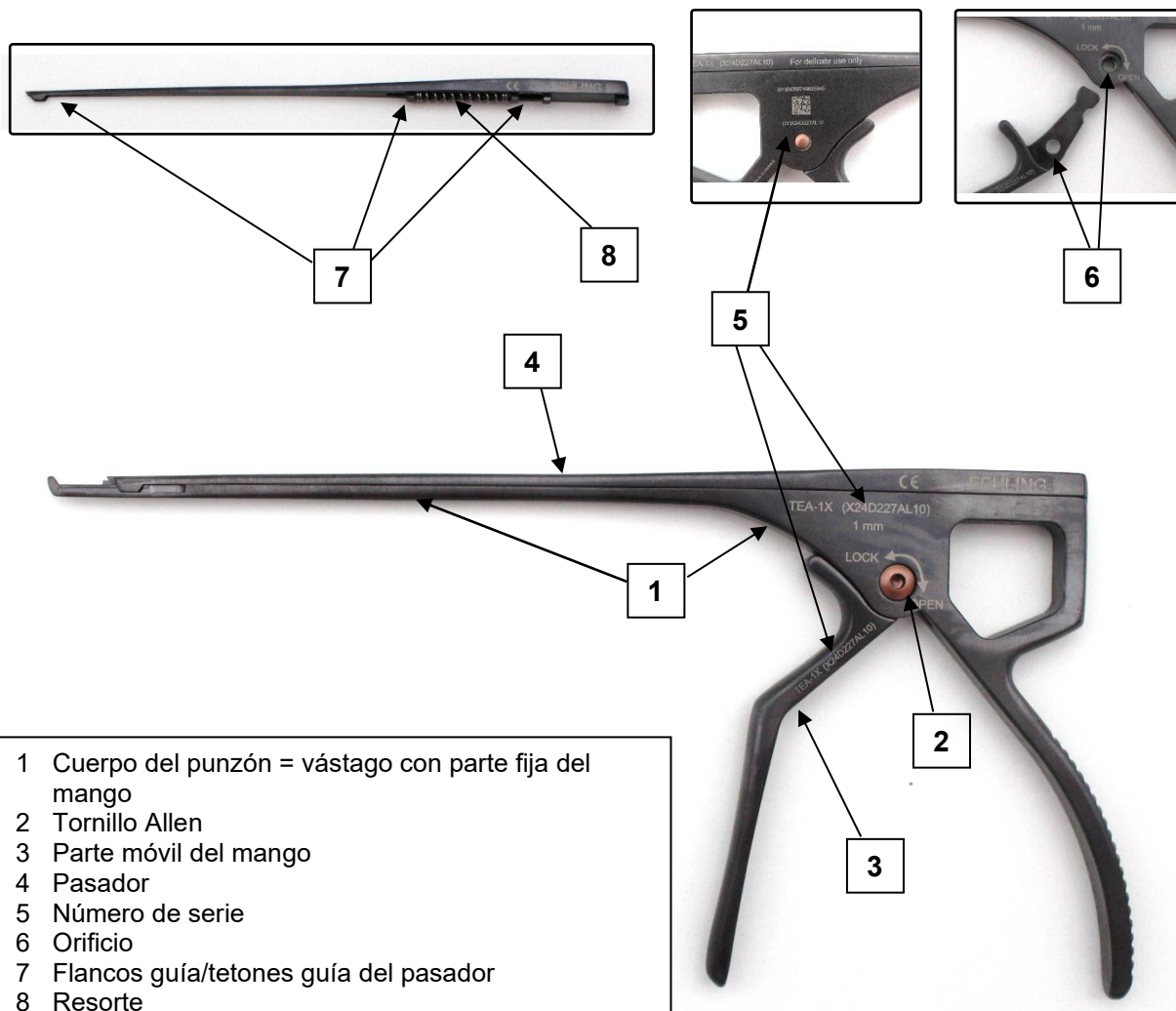

2) Desmontaje


1. Coloque el punzón sobre una superficie de trabajo fija para desmontarlo. Gire el tornillo Allen (2) en el sentido de las agujas del reloj con el destornillador TXX-0X (alternativamente, destornillador esterilizable TXW-9X) y retírelo del orificio del tornillo.




2. Tire de la parte móvil del mango (3) hacia abajo y sepárela del cuerpo del punzón (1). Para facilitar el desbloqueo, hay que empujar el pasador (4) al mismo tiempo hacia el pie del punzón.



Al retirar la parte móvil del mango (3), el pasador (4) se suelta automáticamente.

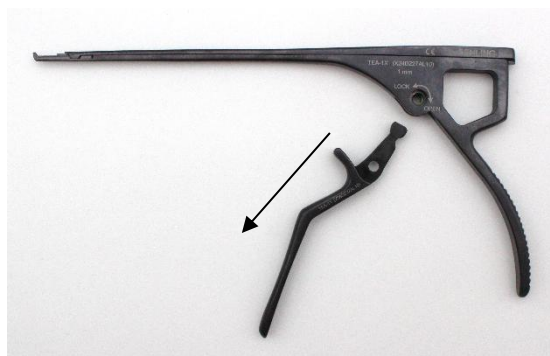

3. El pasador (4) puede ahora retirarse con facilidad del cuerpo del punzón (1).

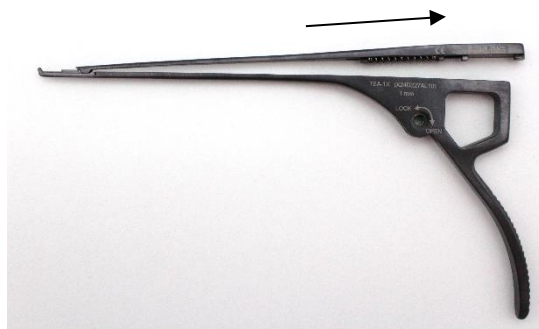

4. Reprocese siempre las cuatro piezas individuales juntas en el mismo recipiente.



El cuerpo del punzón (1), la parte móvil del mango (3) y el pasador (4) llevan un número de serie idéntico para su control (5), por ejemplo, X24D227AL10. Solo pueden montarse juntos los componentes del instrumento con el mismo número de serie (5).

3) Montaje


1. Coloque el pasador (4) con el resorte (8) sobre el vástago (1). Para ello, encajar los flancos guía/tetones guía (7) del pasador (4) en los alojamientos correspondientes del vástago (1).





Los flancos guía/tetones guía (7) del pasador (4) deberán encajar en los alojamientos correspondientes del vástago del cuerpo del punzón (1).

- Presione lentamente el pasador (4) hacia el pie del punzón hasta que el extremo del pasador sobresalga unos 5 mm del extremo del vástago en dirección al pie del punzón.

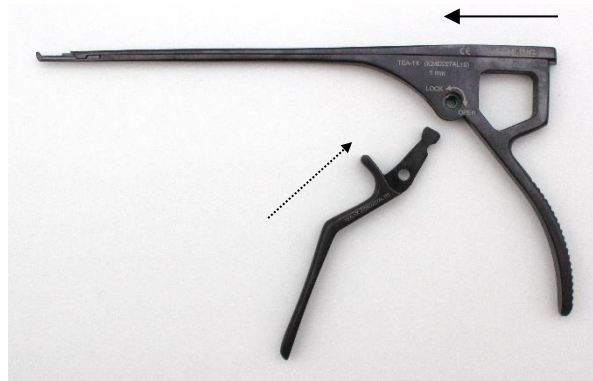

- Sin cambiar la posición del pasador (4) y del vástago (1), deslice la parte móvil del mango (3) en el cuerpo del punzón (1). Asegúrese de que los orificios (6) de la parte móvil del mango (3) y del cuerpo del punzón (1) estén exactamente alineados.



- Atornille el tornillo Allen (2) en el orificio roscado previsto en sentido contrario a las agujas del reloj con el destornillador TXX-0X (alternativamente, destornillador esterilizable TXW-9X). Apriete bien el tornillo sin aplicar fuerza.



¡No lo apriete en exceso!



- El punzón puede volver a utilizarse tras una prueba de funcionamiento.



	• Estos tornillos Allen tienen una rosca a izquierdas. Asegúrese siempre de que la dirección del giro sea la correcta al aflojarlos y apretarlos. • No emplee fuerza al aflojar y apretar el tornillo Allen, ya que no es necesario. El giro forzado del tornillo daña el perfil hexagonal interior. • Si detecta algún daño en el perfil hexagonal interior o en el perfil del destornillador, sustituya inmediatamente el tornillo Allen y el destornillador o haga que los sustituya el fabricante. • El destornillador TXX-0X puede lavarse con agua fría y un detergente suave. No es adecuado para la limpieza en agua caliente ni para la esterilización en autoclave a 134 °C.
---	---

Símbolos		
En la medida en que figuren en el producto sanitario, en la etiqueta del producto sanitario o en las instrucciones de uso, los símbolos tienen el siguiente significado conforme a la norma DIN EN ISO 15223-1:		
 Fabricante	 Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas	 Precaución
 Número de catálogo	 Código de lote	 Número de serie
 Producto sanitario	 Identificador único del producto	 0297 Marcado CE
 Aceitera que indica los puntos a lubricar	 Marcado CE	

Contacto con el fabricante		
	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Alemania Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 Correo electrónico: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	