


FEHLING KLEMMSICHERUNG FÜR AORTENKLEMME


1) Bestandteile / Erklärungsgrundlage

Beispielhaft: MCJ-5

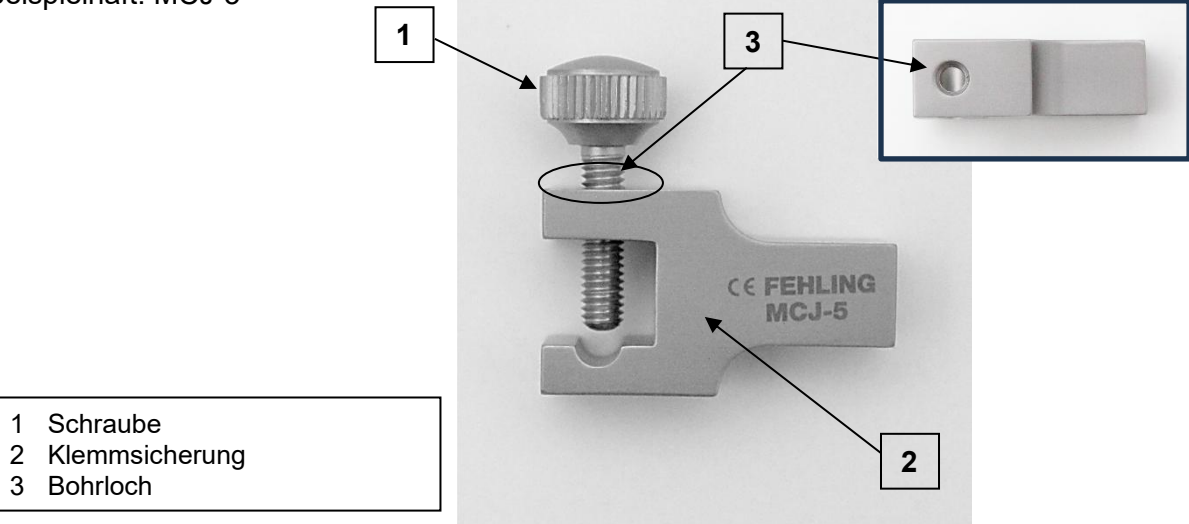

2) Demontage

1. Die Schraube (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich von der Klemmsicherung (2) abnehmen lässt.

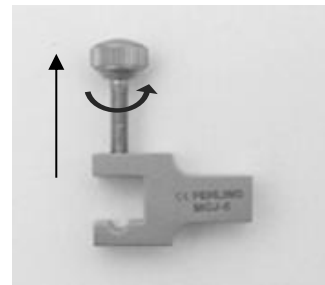


2. Das in seine Einzelteile zerlegte Instrument kann nun aufbereitet werden.



3) Montage

1. Die Schraube (1) in das Bohrloch (3) der Klemmsicherung (2) einsetzen und im Uhrzeigersinn eindrehen.
2. Das zusammengesetzte Instrument ist nach einem Funktionstest nun wieder einsatzbereit.

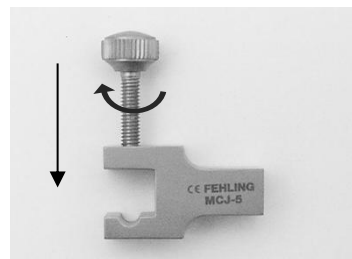

Symbole

Soweit auf dem Medizinprodukt bzw. Medizinproduktetikett bzw. Gebrauchsanweisung abgebildet, haben die Symbole gemäß DIN EN ISO 15223-1 folgende Bedeutung:

 Hersteller	 Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten	 Achtung
 Katalognummer	 Chargenbezeichnung	 Seriennummer
 Medizinprodukt	 eindeutige Produktidentifizierung	 0297 CE-Kennzeichnung
 Ölkännchen für zu schmierende Stellen	 CE-Kennzeichnung	

Kontakt zum Hersteller

	FEHLING INSTRUMENTS GmbH Seligenstädter Str. 100 63791 Karlstein/Germany Tel.: +49 (0) 6188-9574-40 Fax: +49 (0) 6188-9574-45 E-Mail: info@fehling-instruments.de www.fehling-instruments.de	
---	---	---